


# BLUETOOTH EYE MASSAGER

## Manual de Uso

### Español

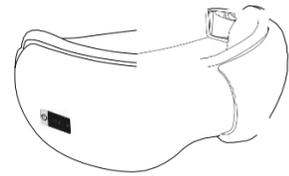

Para un uso apropiado, por favor lea cuidadosamente y conserve este manual.

### Indice

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 1. Precauciones de uso                | 2   |
| 2. Sobre el dispositivo               | 2-3 |
| 3. Contenido del EYEMASSAGER          | 3   |
| 4. Nombre y funciones del dispositivo | 4   |
| 5. Modo de uso                        | 5   |
| 6. Limpieza y mantenimiento           | 6   |
| 7. Fallas y soluciones                | 7   |
| 8. Especificaciones del dispositivo   | 8   |

1

- Si usa lentes de contacto, quíteselos antes de usar este dispositivo.
- Si hay suciedad u objetos extraños en la máscara, límpiela con un paño húmedo antes de usarla para evitar irritación en los ojos.
- No utilice este dispositivo durante el proceso de carga (el producto inicia el programa de autoprotección y deja de funcionar automáticamente).
- No utilice el EYEMASSAGER mientras camina o conduce al aire libre.
- No use el EYEMASSAGER en lugares muy cálidos y húmedos.

El EYEMASSAGER utiliza la tecnología de microchip para controlar la aplicación de presión de aire alrededor de los ojos, es un concepto completamente nuevo para el cuidado de los ojos. Bajo el control de la presión del aire del EYEMASSAGER se obtiene un trabajo completo de los músculos alrededor del ojo, logrando una sensación de descanso y relaxo en la mirada. La combinación de presión, vibración y la función del calentamiento por infrarrojos alivian la inflamación del ojo, el dolor y fatiga ocular generalmente provocada por trabajar varias horas frente a pantalla de computador.

### 1. CARACTERÍSTICAS:

- El dispositivo de masaje ocular se puede conectar al teléfono móvil para reproducir música a través de Bluetooth.
- Uso inalámbrico.
- Modo de carga: Cable USB.
- Tecnología de control por chip de microordenador busca relaxar el área a través de calor por infrarrojos a distancia.
- Posee 5 opciones de masaje.
- Tiempo automático de 15 minutos.
- Masaje con bolsa de aire (masajea los músculos alrededor del área de los ojos haciendo coincidir llenado de aire y liberación de aire).
- Posee modo de vibración.


### 2. AREA DE USO

Para los ojos y contorno.


### 3. CONTRAINDICACIONES:

- No utilizar:
  - En lesiones o inflamación de los ojos.
  - Si hay síntomas de enfermedades oculares, como complemento post cirugía ocular, glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina y otras enfermedades oculares importantes para pacientes.
- En pacientes con accidente cerebrovascular, hipertensión e hipotensión, consulte primero a un médico profesional.
- Si siente alguna molestia durante el uso, deje de usarlo inmediatamente.
- Evite el uso de EYEMASSAGER si ha bebido alcohol o durante molestias físicas.

Dispositivo EYEMASSAGE, Cable cargador USB, Manual de Instrucciones.

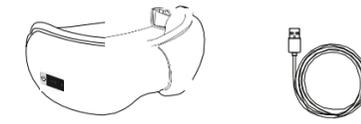

3

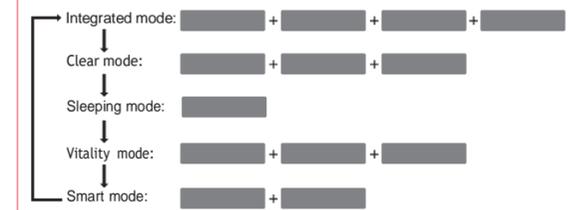

1. Un click para encendido
- (1) Mantenga presionada la tecla durante 3 segundos para iniciar Integrate Mode (presión de aire + vibración + compresa caliente + música).
- (2) Presione la tecla nuevamente para iniciar Clear Mode (presión de aire + compresa caliente + música).
- (3) Presione la tecla nuevamente para iniciar Sleeping Mode (presión de aire)
- (4) Presione la tecla nuevamente para iniciar Vitality Mode (presión de aire + vibración + música).
- (5) Presione la tecla nuevamente para iniciar Smart Mode (compresa caliente + música).
- (6) Mantenga presionado el botón por 3 segundos para apagar el dispositivo.
- (7) Active Bluetooth en su teléfono móvil y busque el nombre de Bluetooth: YBY EYEMASSAGER se conectará automáticamente.

Botón de control.


4

### MODO DE USO

1. Preparación antes de usar
  - (1) Retire suavemente EYEMASSAGER de su empaque.
  - (2) Coloque EYEMASSAGER sobre el área de sus ojos.

### Uso (como se muestra)


Bluetooth Presión de aire Compresa caliente Vibración Música pausa/play

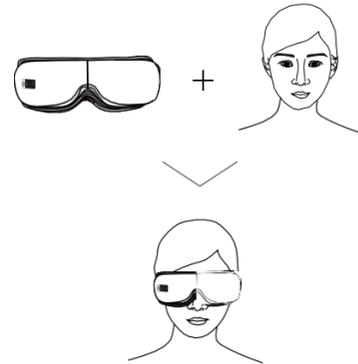

5

### Limpieza y mantenimiento de EYEMASSAGER:

1. Limpieza
  - Si el producto está sucio, límpielo con un paño suave y seco.
  - Si está particularmente sucio, puede limpiarlo con un paño húmedo con alcohol desnaturalizado.

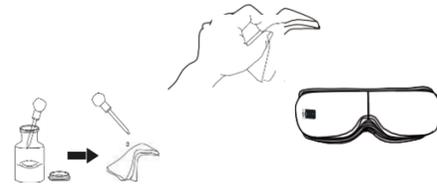

2. Mantenimiento
  - Manténgalo seco, ventilado y limpio.
  - Manténgalo fuera del alcance de los niños.
  - No desmonte ninguna pieza del EYEMASSAGER.

6

### Verificación de fallas:

1. Si la carga de la batería es demasiado baja, cárguela inmediatamente.
2. Protección del host, conecte el cargador al EYEMASSAGER, cargue y permita que el host elimine automáticamente la protección (cargue durante 5 segundos).
3. La batería no está cargada y el cargador está dañado.
4. La intensidad de la presión es demasiado débil.

**Nota: El trabajo de mantenimiento debe ser realizado por nuestro personal autorizado.**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Nombre del producto | Eye massager     |
| Tiempo automático   | 15 minutos       |
| Voltage             | DC 5V            |
| Consumo de energía  | 3.4W             |
| Carga               | AC 100-240V DCSV |

7

| Tipo de falla                              | Posibles causas                  | Solución  |
|--|----------------------------------|---|
| EYEMASSAGER no enciende                    | Batería baja                     | Cargue inmediatamente   |
|  | Protección placa madre(en carga) | Conecte el cable cargador al dispositivo, y permita al host remover automáticamente la protección (desconecte luego de 5 seg. de carga) |
|  | La batería no carga              | Reemplace el cable cargador   |
|  | Durante la carga                 | Desconecte el cargador  |
| La presión es muy débil                    | Poca carga                       | Cargar dispositivo  |
| El modo de compresión de calor no funciona | Poca carga                       | Cargar dispositivo  |
|  | El patrón es equivocado          | Cambie al patron deseado  |

8

MESSAGE BRNGS WISDOM TO LIFE